





1. Выберите правильный аппарат с помощью его цветовой квадрантной маркировки.
Зеленый - верхний правый, **Желтый** - верхний левый,
Красный - нижний правый, **Белый** - нижний левый


Инструкции по удержанию пространства

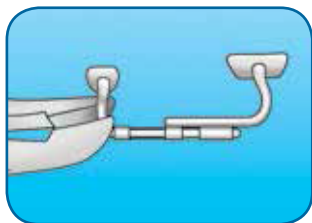

2. Удалите раскрывающую пружину. Удерживая аппарат стандартными щипцами Хоу, отрегулируйте необходимую длину.

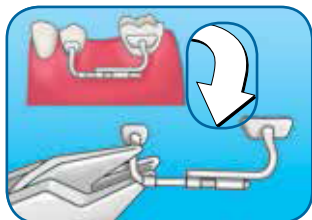


3. Проверьте плотность прилегания аппарата к поверхностям зубов. При необходимости можно дополнительно адаптировать аппарат с помощью трехклювых щипцов (см.пример).

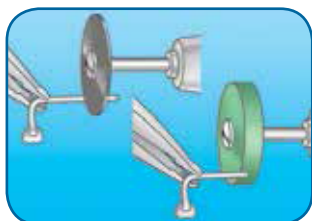

4. Если необходима меньшая величина аппарата для маленького промежутка, то возможно подпилить и отшлифовать стержень аппарата (см.пример).




5. Зафиксируйте длину и положение аппарата, сжав стопор с помощью стандартных щипцов Хоу.

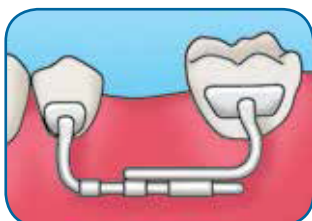


6. Нанесите протравливающий гель на поверхность каждого зуба на 1 минуту. Тщательно промойте и высушите зубы. Прикрепите аппарат с помощью адгезива.


Инструкции по созданию пространства

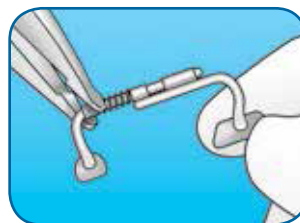


2. Перед активацией раскрывающей пружины сожмите стопор с помощью стандартных щипцов Хоу.

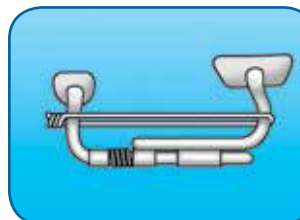

3. Сжимая пружину, отрегулируйте длину аппарата стальной лигатурной проволокой с помощью зажима Мэтью. Закрутите лигатуру до необходимой длины.

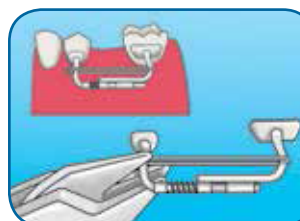

4. Проверьте плотность прилегания аппарата к поверхностям зубов. При необходимости можно дополнительно адаптировать аппарат с помощью трехклювых щипцов (см.пример).

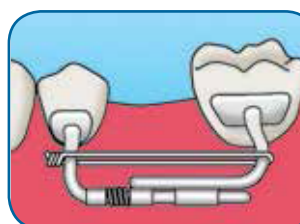

5. Нанесите протравливающий гель на поверхность каждого зуба на 1 минуту. Тщательно промойте и высушите зубы. Прикрепите аппарат с помощью адгезива.



6. Обрежьте лигатуру. Аппарат начнет оказывать давление для создания потерянного пространства или выравнивания соседних зубов.