



Track® Bleach

Заготовка для кап
Tiefziehfolie
Thermoforming foils
Feuilles pour façonnage thermoplastique
Láminas de reproducción termoplástica
Foglie termoformabili



Проверьте сроки хранения •
Mindesthaltbarkeitsdatum beachten • please check the use by date
considérer la date limite de conservation • rispettare la data di scadenza
considerar la fecha minima de caducidad



Внимательно читайте инструкцию •
Gebrauchsanweisung beachten • see operating instructions
considérer le mode d'emploi • rispettare le istruzioni per l'uso
considerar la instrucción de funcionamiento



Для однократного использования •
Nicht zur Wiederverwendung • for single use only • pas à la réutilisation
non riutilizzabili • no a la reutilización



< 25°C

Хранение при температуре
не более 25°C •
Lagerung • storage • stockage
Conservazione • almacenaje



93/42/EWG



Quality System



Certified by DQS acc.to
DIN EN ISO 9001 : 2000
DIN EN ISO 13485 : 2003
Annex II of Directive
93/42/EEC
Reg. No. 055387

FORESTADENT®

GERMAN PRECISION IN ORTHODONTICS

Химические характеристики:

PEVA: ethyl-vinyl-acetate (этил-винил-ацетат)

Безвредно для здоровья, проверено на биосовместимость.

Растворяется в воде, неактивен, безвредно для грунтовых вод.

Утилизация / Переработка:

Бытовые отходы (с низким содержанием загрязняющих веществ) / общая утилизации пластика.

Применение:

Каппы для отбеливания, каппы для ремтерапии (фторирования).

Свойства материала:

Гибкий материал, обладающей высокой эластичностью и стабильностью размера.

Пластификация:

(для машин без датчика контроля времени разогрева). Разогревайте пленку до тех пор, пока не увидите, что она чуть провисает, далее приступайте к штамповке.

Доступно: Track® Bleach, прозрачный, диаметр 125 мм.

	Толщина	Количество	Номер для заказа	Время разогрева Для MINISTAR® / Biostar®	Код
Track® Bleach	1,0 мм.	100	408-0610	50 сек.	162