

- изготовлен из автоклавируемого поликарбоната
- легко позиционируется
- обеспечивает чистую область для осмотра и работы
- удобен для пациента
- не отражает свет, идеален для фотографирования, стоматологических операций, удаления зубного камня, ортодонтических процедур и др.

Ограничение повторного использования: Не более 50-ти раз.

Размещение: При использовании размещать на чистой поверхности с одноразовой тканью или бумажным полотенцем.

Подготовка к очистке: Не требуется

Очистка: Используйте только пригодные для синтетики/пластика очистители согласно указаниям производителя. После очистки тщательно смойте очиститель водой. При очистке не превышайте температуру 93 °С.

Дезинфекция: Используйте только пригодные для синтетики/пластика дезинфицирующие растворы согласно указаниям производителя. После очистки тщательно смойте дезинфицирующий раствор водой. Не допускается наличие дезинфицирующего средства на ретракторе перед воздействием пара. При дезинфекции не превышайте температуру 93 °С.

Обслуживание: Не требуется.

Упаковка: Стандартизованный упаковочный материал для стерилизации (рекомендовано)

Стерилизация: Автоклав при 134 °С в течение 5 минут или при 121 °С в течение 15 минут.

Контроль исправности: Визуальный осмотр на предмет повреждений, износа, деформации.

Хранение: Никаких специальных требований.

**Пожалуйста, полностью удалите дезинфицирующее средство перед обработкой паром!
Мы рекомендуем использовать для стерилизации безопасную программу (121 °С)!
Пожалуйста, не допускайте контакта ретрактора с металлическими инструментами!**