

ВОСК ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРИКУСА «ALMORE»

Воск для регистрации прикуса ALMORE был разработан для точного отображения окклюзионных взаимоотношений в соответствии с вашими требованиями. Наш воск настолько точен, что воспроизводит мельчайшие детали окклюзии. При отливке моделей избегайте нежелательное взаимодействие между двумя материалами и для этого обрезайте излишки воска с тем, чтобы оставались отпечатки только крайней окклюзионной части бугров.

Нагревать на водяной бане с контролем температуры в течении одной 1 (одной) минуты при температуре 135 градусов по Фаренгейту (57,22 градусов по Цельсию). После получения регистрационного шаблона его необходимо поместить в холодную воду для максимального затвердевания и облегчения дальнейшего срезания излишков воска.



ООО «Ортосмайл» является официальным представителем компании «Almore International»
Москва, Попов проезд, д. 1, корп.1 оф. 2