



Ortho Technology, Inc. 4614 Pet Ln. Suite D-101, USA  
Эксклюзивный дилер в России – ООО «Ортосмайл»  
119071 Москва, ул. Малая Калужская, д. 15, стр. 1  
тел.: (495) 966-03-04  
E-mail: orthosmile@pumpagroup.ru  
www.pumpagroup.ru

## Light-Bond™ / Лайт-Бонд

### СВЕТОТВЕРЖДАЕМЫЙ ПРАЙМЕР

#### ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Лайт-Бонд предназначен для использования в качестве светоотверждаемого праймера с ортодонтическим клеем.

#### ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

##### Профилактика:

Обработать поверхность эмали. Тщательно промыть и высушить поверхность.

##### Травление:

Выполнить травление поверхности эмали. Промыть и высушить поверхность.

##### Нанесение праймера Лайт-Бонд:


Нанесите от одной до двух капель праймера Лайт-Бонд на подушечку для смешивания. Кистью нанесите тонкий равномерный слой на протравленную эмаль. Обработка праймера светом в это время не обязательна, но может быть проведена, чтобы исключить скольжение брекета. Для этого поднести световод как можно ближе к поверхности зуба, но не касаться его.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Использование ультрафиолетовых, галогенных и светодиодных полимеризационных ламп может вызвать повреждение глаз. Во время применения светоотверждающих устройств пациент, врач и ассистент должны использовать подходящие защитные очки.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Неполимеризованные смолы Лайт-Бонд могут вызывать кожную аллергическую реакцию у некоторых пациентов. При попадании на кожу тщательно смыть состав водой с мылом. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и немедленно обратиться за медицинской помощью. Контакт с другими тканями: немедленно промыть место контакта большим количеством воды; промывку выполнять в течение нескольких минут.

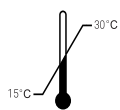

**ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:** Хранить при комнатной температуре (15-30 С). Беречь от чрезмерного нагрева. Перед использованием дать продукту нагреться до комнатной температуры.



**ВАЖНО!:** Не подвергать воздействию прямого света в течение длительного периода времени: это может привести к частичной активации состава. Пасту можно нанести на брекеты заранее, однако, ее необходимо защитить от воздействия внешнего света (например, накрыть крышкой от коробки).

**ГАРАНТИЯ:**

Компания ООО «Ортосмайл» принимает на себя ответственность за замену продукции в случае доказанных дефектов продукции. Компания ООО «Ортосмайл» не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб в результате использования или невозможности использования продуктов согласно инструкции. Перед использованием пользователь принимает на себя ответственность за определение пригодности продукта для его использования по назначению. В связи с этим пользователь принимает на себя все риски ответственность в данном отношении.

**Исполнение:** арт# LBS3F – Праймер Лайт-Бонд светоотверждаемый, 3 г) со Фтором, LBS7F – Праймер Лайт-Бонд (светоотверждаемый, 7 г) со Фтором, LBS3 – Праймер Лайт-Бонд светоотверждаемый, 3 г) без Фтора, LBS7 – Праймер Лайт-Бонд (светоотверждаемый, 7 г) без Фтора.

V 8 МАРТА 2020 ГОДА